

Wyrób medyczny klasy 1 zgodnie z MDR (UE) 2017/745.

Urządzenia te są przeznaczone do obsługi przez każdego, kto jest w stanie przeczytać i zrozumieć instrukcje użytkowania.

Profil pacjenta: Każdy rodzaj pacjenta, którego patologia wymaga zastosowania urządzenia wspomagającego zapobieganie i/lub leczenie odleżyn.

Profil operatora w zakresie instalacji, wdrożenia, regulacji i konserwacji: Pacjent, pracownicy służby zdrowia, konserwatorzy, osoby trzecie. Nie ma szczególnych ograniczeń dotyczących obsługi i użytkowania urządzenia.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Pomoc w utrzymaniu prawidłowej postawy w pozycji siedzącej. Sprzęt do użytku na krzesła z podłokietnikami. Nie jest on przeznaczony do stosowania w łóżku.

WSKAZANIA

P951D: Podparcie pleców i Terapeutyczne Opakowania Combi-Pack mogą być stosowane w celu poprawy pozycji na wózku inwalidzkim, poprawy orientacji siedzenia, przyczynienia się do zmniejszenia zsuwania się do przodu, przyczynienia się do złagodzenia bólów pleców.

P961F: Przeznaczony dla pacjentów z częściowymi lub całkowitymi deficytami postawy w pozycji siedzącej po niewydolności nerwowej lub mięśniowej. Przeznaczony dla pacjentów z częściowymi lub całkowitymi deficytami postawy w pozycji siedzącej po niewydolności nerwowej lub mięśniowej. Wybór urządzenia musi być zatwierdzony przez pracownika służby zdrowia.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Urządzenia ze zintegrowaną osłoną POLYMAILLE® / POLYMAILLE®HD mogą być używane u jednego lub wielu pacjentów. Można je regenerować zgodnie z instrukcją produktu oraz instrukcjami czyszczenia i dezynfekcji.

Pierwszy środek zapobiegawczy przeciwko odleżynom: ciało należy podnosić jak najczęściej, aby ograniczyć kompresję naczyń krwionośnych, a tym samym umożliwić prawidłowe krążenie krwi.

PRZECIWSKAZANIA

Nie używaj urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i wskazaniami. Nie stosować w przypadku uczulenia na poliuretan. W przypadku jakichkolwiek problemów należy skonsultować się z lekarzem.

EFEKTY UBOCZNE

Nie ma żadnych niepożądanych skutków ubocznych. Jednak pacjent może odczuwać skutki nieodłącznie związane z zanurzeniem: możliwe (ograniczone) zmniejszenie percepcji i mobilności. Zwiększone odczuwanie ciepła.

WYDAJNOŚĆ URZĄDZEŃ

Utrzymywanie postawy w pozycji siedzącej

KORZYŚCI KLINICZNE

P951D: Poprawiony komfort pacjenta. Przyczynia się do zmniejszenia bólów pleców i stabilności tułowia.

P961F: Zmniejsza ryzyko podwichnięcia barku i przyczynia się do utrzymania / stabilności równowagi tułowia.

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA

Stosuj pomoce do pozycjonowania lub urządzenia obniżające ciśnienie u pacjentów z odleżyną / odleżyną. Upewnij się, że urządzenie jest odpowiednie dla środowiska pacjenta. Zapewnienie ciągłości leczenia.

PRZECHOWYWANIE, OBSŁUGA, TRANSPORT

- Najlepiej na płasko. Nie wystawiaj w pobliżu znaczącego źródła ciepła.
 - Eventualnie w suchym i umiarkowanym miejscu chronionym przed ciepłem i światłem w torbie ochronnej.
 - Ostrożnie obchodź się z urządzeniem, aby nie uszkodzić pokrowca.
 - Transport w torbie transportowej lub w pudełku.
- Przy każdym przeładunku / transporcie należy przestrzegać poniższych wskazówek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Nie używaj bez osłony.
- Nie umieszczaj żadnych obcych ciał między pacjentem a sprzętem poza ubraniem.
- Uwaga, aby nie uszkodzić obudowy. Obserwowano częste degradacje: oparzenia papierosami, zadrapania po zwierzętach, dziury po igłach, skaleczenia skalpelem lub ostrymi przedmiotami, uszkodzenia spowodowane użyciem sprzętu o ostrych krawędziach.
- Zalecamy zapewnienie dodatkowego pokrowca ochronnego.
- Nie używaj zapasowych pokryw, akcesoriów lub elementów innych niż dostarczone przez SYST'AM®.
- Patrz instrukcje „Czyszczenie i dezynfekcja”.
- Jeśli zaobserwujesz pogorszenie się jakości produktu (odkształcenie lub wyciek piany) lub efekt dna, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Trzymaj z dala od źródeł łatwopalnych.
- Zgłaszaj swojemu opiekunowi tak szybko, jak to możliwe, wszelkie nietypowe zdarzenia, takie jak ból, zaczerwienienie lub wybielenie punktów podparcia.
- Każdy poważny incydent, który wystąpił w związku z urządzeniem, należy zgłosić producentowi i właściwemu lokalnemu organowi.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiały na poduszki:

P951D, P961F: wiskoelastyczna pianka poliuretanowa (PU) (80 kg/m³).

P952D: Pianka o wysokiej sprężystości (PU) (40 kg/m³).

Materiał pokrowców:

POLYMAILLE®: powłoka poliuretanowa na dżerseju.

PRZEWIDYWANY OKRES UŻYTKOWANIA

Żywność tych produktów wynosi 5 lat, jeśli są używane ściśle według instrukcji dotyczących pielęgnacji i konserwacji. Żywność może być dłuższa, jeśli produkt jest konserwowany ostrożnie i znacznie skracana przez ekstremalne lub niewłaściwe użytkowanie. Nie stanowi to dodatkowej gwarancji na te produkty.

GWARANCJA

Dwa lata w przypadku wad produkcyjnych, licząc od daty zakupu przez klienta. Drobne niedoskonałości (drobne rozdzarcia, marmurkowanie, wady powierzchni itp.) powstałe w wyniku procesu produkcyjnego w żaden sposób nie wpływają na jakość i skuteczność produktu oraz nie mogą być powodem do wymiany produktu na gwarancji. Gwarancja nie obejmuje niewłaściwego użycia wspornika, normalnego zużycia urządzenia lub jego obudowy. W przypadku niewywiązania się z umowy, należy skontaktować się z dostawcą i podać mu numer partii produktu.

BEZPIECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO

Nie spalaj ani nie wyrzucaj. Szanuj kanały recyklingu obowiązujące w Twoim kraju. Nie spożywaj. 0 % C.F.C. pianka. Zgodność z normami przeciwpożarowymi EN 597-1 i 597-2.



MD P951D



MD P961F



PL

Pomoc w zachowaniu właściwej postawy w pozycji siedzącej
INSTRUKCJA STOSOWANIA




SYSTEM ASSISTANCE MEDICAL SAS
ZAE - Route de Casseneuil - LE LEDAT
47300 VILLENEUVE SUR LOT - FRANCE

Tel. commercial : 05 53 40 23 50 - Fax commercial : 05 53 40 50 40
International phone + 33 553 40 50 30 - International fax + 33 553 40 58 38
www.system.com

Siret : 392 011 920 00015 - APE 331 B - FR 12 392 011 920

© SYST'AM®
08/2022
4734DV2

REF P951D1HW

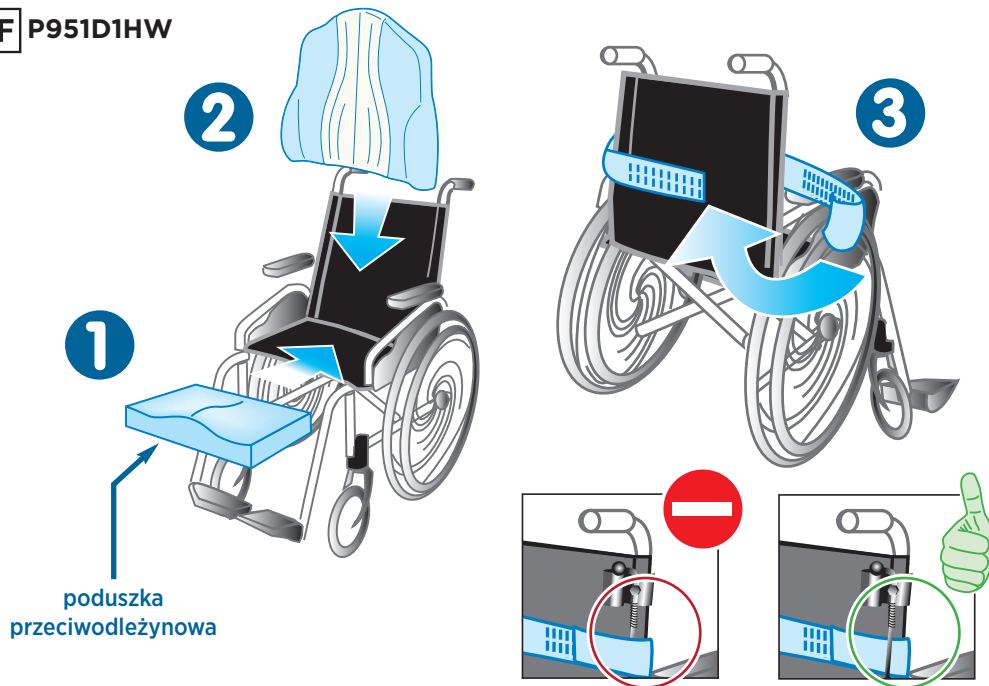

Instalacja:


W celu uzyskania prawidłowej pozycji na krześle należy zadbać o to, aby rozmiar elementów pasował do krzesła.

| REF | | | | | | | REF |
|-----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| P951DS1HW | | SMALL | 44 cm / 17" | 39 cm / 15" | 9 cm / 3,5" | 0,75 kg / 0,34 lbs | P951SHW |
| P951D1HW | | STANDARD | 49 cm / 19" | 44 cm / 17" | 9 cm / 3,5" | 0,90 kg / 0,40 lbs | P951HW |
| P951DL1HW | | LARGE | 49 cm / 19" | 50 cm / 20" | 10 cm / 4" | 0,95 kg / 0,43 lbs | P951LHW |
| P952D1HW | | STANDARD | 49 cm / 19" | 44 cm / 17" | 9 cm / 3,5" | 0,70 kg / 0,31 lbs | P952HW |

SZEROKOŚĆ WÓZKA INWALIDZKIEGO

| REF | 30 cm 12" | 32 cm 12,5" | 34 cm 13" | 36 cm 14" | 38 cm 15" | 40 cm 15,5" | 42 cm 16" | 44 cm 17" | 46 cm 18" | 48 cm 19" | 50 cm 19,5" |
|----------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| P951DS1HW | + | +++ | +++ | +++ | ++ | | | | | | |
| P951D1HW P952D1HW | | | | + | +++ | +++ | +++ | ++ | | | |
| P951DL1HW | | | | | | | + | +++ | +++ | +++ | ++ |

REF P961F1HW

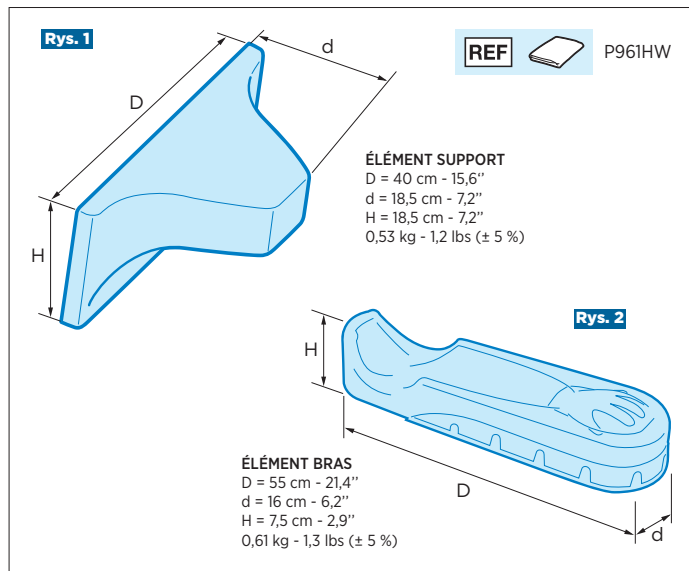

Instalacja:

W celu uzyskania prawidłowej pozycji na krześle należy zadbać o to, aby rozmiar elementów pasował do krzesła.

- Ułożyć pacjenta w fotelu. Umieścić **klin podtrzymujący (Rys. 1)** na udzie pacjenta ze stabilnym bokiem (**A** por. **Rys. 3**) skierowanym na zewnątrz, przy podłokietnikach.
- Następnie umieścić podkładkę (**Rys. 2**) na klinie podtrzymującym i upewnić się, że ręka spoczywa na gałce (**B** por. **Rys. 3**). System mocowania na obu częściach (**C** por. **Rys. 4**) pozwala w prosty sposób dostosowywać ułożenie do morfologii pacjenta, zwiększając komfort poszczególnych pacjentów (**Rys. 5**).
- Utrzymują ramię we właściwym położeniu za pomocą pasów (**D** por. **Rys. 3**).

