

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa aluminiowa

Kod produktu: RANGER



1. Wykonanie

Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy aluminiowej. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko z oparciem, uchwyt na kulę/laskę, uchwyt na kubek/butelkę oraz podręczną torbę. Posiada duże pompowane koła o średnicy 12'' oraz regulowane na wysokość rączki zakończone anatomicznymi uchwytami. Konstrukcja opiera się na ramie krzyżakowej oraz owalnym przekroju rurek, dzięki czemu znacznie podwyższona została wytrzymałość na nacisk osiowy. Zestaw zawiera: ramę podpórki wraz z siedziskiem, koła przednie, koła tylne z nóżkami, oparcie, torbę na zakupy.

Elementy podpórki:

1. Uchwyt
2. Regulowana rurka uchwytu
3. Hamulec z trybem postojowym
4. Zacisk regulacyjny
5. Oparcie
6. Siedzisko z uchwytem
7. Hak na torbę
8. Przednie koło
9. Regulacja hamulca
10. Tylne koło
11. Zatrask bezpieczeństwa
12. Pedał
13. Uchwyt na kulę/laskę
14. Pin blokujący
15. Uchwyt na kubek/butelkę



2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż, rozłożenie, złożenie i regulacja podpórki

Montaż podpórki

- Wypakować wszystkie elementy z pudełka i rozłożyć na płaskim podłożu (rama z 2 nóżkami tylnymi połączonymi przewodami hamulcowymi, 2 przednie koła, oparcie, torba).
- Naciskając piny blokujące, włożyć obie tylne nóżki z kołami do otworów w ramie podpórki.
(prawa i lewa nóżka są połączone z właściwą stroną ramy podpórki przewodami hamulca).
- Naciskając piny blokujące, włożyć oba przednie koła do otworów w przednich widelcach ramy podpórki.
- Zamontować oparcie w uchwytach po wewnętrznej stronie rączek.
- Zawiesić torbę na hakach.



Rozłożenie podpórki

- Aby rozłożyć ramę podpórki należy złapać oba uchwyty i pociągnąć je na zewnątrz.
- Docisnąć boczne szyny siedziska do momentu całkowitego rozłożenia (kliknięcie mechanizmu blokującego).

Złożenie podpórki

- Aby złożyć podpórkę należy podnieść siedzisko za uchwyt i podciągnąć go do góry.
- Złapać oba uchwyty podpórki i docisnąć je do wewnątrz.

Regulacja wysokości uchwytów

Aby wyregulować wysokość uchwytu, należy:

- Nacisnąć hamulec w dół aby ustawić tryb postojowy i unieruchomić podpórkę.
- Pociągnąć i przytrzymać zacisk regulacyjny.
- Wyregulować wysokość uchwytów.
- Zwolnić zacisk regulacyjny aby zablokować ustawioną wysokość uchwytów. Pociągnąć kilka razy uchwyt do góry i w dół aby sprawdzić poprawne zablokowanie wysokości.
- W podobny sposób wyregulować wysokość drugiego uchwytu.
- Oba uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.



Funkcja hamulców

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.



Regulacja hamulców

Odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.



4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	67 cm
Długość całkowita	75,5 cm
Głębokość siedziska	21 cm

Wysokość całkowita	89,5-102,5 cm
Wysokość siedziska od podłoża	59 cm
Waga	10,8 kg
Max obciążenie	136 kg
Maks. obciążenie koszyka	5 kg
Kolor ramy	biały

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć. Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających. Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, zacisków, blokad).

7. Warunki przechowywania i transportu








Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
---	--------------------	---	-----------

	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na www.timago.com
Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00
F.: +48 33 499 50 11
E.: info@timago.com



07/2023(I)