



**Wytwórca: Mobilex A/S**

Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

**Dystrybucja i serwis w Polsce:**

**Mobilex sp. z o.o.** ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź

tel.: (0-42) 214-29-11, fax.: (0-42) 214 14 05

e-mail: [info@mobilex.pl](mailto:info@mobilex.pl), [www.mobilex.pl](http://www.mobilex.pl)



## Instrukcja Użytkowania

# Kąpielowo – toaletowy wózek inwalidzki (Shower Chair)

Nr kat. 302017/18/19

**Uwaga!** Przed użyciem należy uważnie przeczytać i zapoznać się z tą instrukcją.

### **PRZEZNACZENIE WYROBU**

Wózek przeznaczony jest do siedzenia na nim w trakcie kąpieli pod prysznicem lub w czasie wypróżnienia. Przeznaczony jest do używania wewnątrz pomieszczeń. Wyrób przeznaczony jest zarówno do użytku domowego jak i w placówkach opieki medycznej i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Użytkowanie wyrobu w innym celu, niż opisany powyżej jest zakazane.

### **Etykieta wytwórcy**

Na każdym wyrobie znajduje się etykieta wytwórcy zawierającą istotne informacje o produkcie. Umieszczona jest ona na ramie wyrobu. Etykieta ta opracowana jest w j. angielskim, dlatego zamieszczamy objaśnienie poszczególnych pozycji znajdujących się na niej. Etykieta taka określa: nazwę wytwórcy, nr telefonu i jego adres, nazwę wyrobu (**Shower Chair = Kąpielowo-toaletowy wózek inwalidzki**), datę produkcji (**Produced**), nr seryjny (**Serial no.**), Dopuszczalne obciążenie (**Max. 150 kg**) i znak CE.

### **UŻYTKOWANIE**

Wózek ten stworzono z myślą o tych osobach o ograniczonej sprawności ruchowej, które z tego powodu potrzebują dodatkowej stabilizacji w trakcie kąpieli pod prysznicem oraz w czasie wypróżniania. Wyrób wykonany jest ze stali lakierowanej proszkowo, co zapewnia miły dotyk i odporność na korozję.

### **Hamulce**

- Zawsze załączaj hamulce, jeśli nie zamierzasz przemieszczać wózka.
- Nigdy nie zostawiaj wózka bez załączonych hamulców, jeśli ktoś na nim siedzi.
- Nigdy nie zostawiaj wózka na pochyłościach.
- Aby załączyć hamulec nadepnij palcami stopy na pedał znajdujące się przy tylnym kółku wózka, dopóki nie poczujesz, że hamulec się załączył.
- Aby rozłączyć hamulec pchnij palcami stopy od dołu ku górze pedał znajdujące się przy tylnym kółku wózka, dopóki nie poczujesz, że hamulec się rozłączył.

### **Unoszenie i opuszczanie podłokietników**

- Ta funkcja ułatwia transfer użytkownika do i z wózka.
- Ułatwia też umycie wszystkich części ciała użytkownika podczas brania prysznica.
- Nigdy nie zostawiaj użytkownika w wózku bez opieki, jeśli podłokietniki są uniesione.
- Aby unieść podłokietnik chwyć jego koniec i po prostu pociągnij go ku górze do pozycji pionowej.
- Aby zabezpieczyć osobę siedzącą na wózku opuść go w dół, do pozycji poziomej.

### **Montaż i demontaż podnóżków**

- Ta funkcja, wraz z unoszonymi stopkami ułatwia transfer użytkownika do i z wózka.
- Ułatwia też umycie wszystkich części ciała użytkownika podczas brania prysznica.
- Nigdy nie przemieszczaj wózka, jeśli ktoś w nim siedzi, a podnóżki są zdemontowane. Zawsze umieszczaj stopy użytkownika na podnóżkach, jeśli zamierzasz przemieszczać wózek.
- Aby odblokować i zdjąć podnóżek naciśnij dźwignię blokującą, która się na nim znajduje i obróć podnóżek na zewnątrz wózka.
- Chwyć za górną część podnóżka i wyciągnij go ku górze z otworu znajdującego się na końcu ramy wózka.
- Aby ponownie zamontować podnóżek wsuń go z powrotem w otwór na końcu ramy. i obróć go ku wewnętrznej stronie wózka, aż zablokuje się samoczynnie we właściwej pozycji.

### **Regulacja długości podnóżków**

- Długość podnóżków powinna być ustawiona tak, aby dopasować się do wzrostu użytkownika.
- Podnóżki wyregulowane są prawidłowo, jeśli podczas siedzenia w wózku uda użytkownika w całości stykają się z siedziskiem, a stopy w całości spoczywają na podnóżkach.
- Zdejmij podnóżek z wózka.
- Poluzuj śrubę znajdującą się na czarnym zacisku w dolnej części zewnętrznej rurki podnóżka.
- Ustaw podnóżek na wymaganej długości przesuwając rurkę wewnętrzną w rurce zewnętrznej.
- Dokręć śrubę z powrotem.

### **Korzystanie z wiaderka na ekskrementy**

- Wiaderko to powinny wykorzystywać osoby, które ze względu na swój stan zdrowia nie są w stanie używać standardowych ubikacji.
- Nigdy nie zostawiaj wiaderka nieopóźnionego lub nieumytego.
- Aby skorzystać z wiaderka zdejmij z siedziska jego środkową część (wkładkę).
- Zdejmij pokrywkę z wiaderka.
- Po zakończeniu wypróżniania załóż na powrót pokrywkę i wyciągnij wiaderko spod siedziska ku przodowi.
- Opróżnij wiaderko, umyj je i wsuń z powrotem pod siedzisko wózka.
- Załóż na powrót środkową, wyjmowaną wkładkę siedziska.

### **WAŻNE UWAGI**

- Przed użyciem produkt powinien być kompletnie zmontowany. Proszę się z nami kontaktować, w przypadku jakichkolwiek problemów w tym zakresie
- Składane i regulowane mechanizmy mogą stać się przyczyną zagrożenia, jeśli części ciała dostałyby się w szczelinę między elementami i mogłyby uwięzić w niej wówczas, gdy szczelina się zmniejszy.
- Przed każdorazowym użyciem wyrobu należy zawsze sprawdzić, że wszystkie regulowane części są dobrze zamocowane.
- Zachować ostrożność na mokrej lub śliskiej nawierzchni
- Nie należy wkładać palców w otwory w siedzisku służące do odprowadzania wody. Grozi to przycięciem lub utknięciem palca.

### **INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI**

- Wyrób należy czyścić regularnie, używając tylko wody i łagodnych detergentów. Nie używać środków ściernych lub szorujących środków czyszczących.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek defekty lub uszkodzenia, należy niezwłocznie poinformować o tym dostawcę. Nie wolno używać wyrobu, jeśli podejrzewa się, że jest on uszkodzony lub brakuje w nim jakichś części.
- Czas użytkowania wyrobu nie jest określony, należy jednakże raz na pół roku sprawdzić czy nie ma ona zużytych elementów, w razie potrzeby należy je naprawić lub wymienić na nowe.

### **DANE TECHNICZNE**

Całkowita wys. (cm): 90-95 cm

Wymiary siedziska, szer. x dł. x wys. (cm): 48 x 86 x 88

Waga wyrobu: 15,9 kg

Waga użytkownika i maksymalne obciążenie nie może przekraczać: 150 kg przy rozmiarze siedziska 45-48 cm, opcjonalnie 200 kg przy rozmiarze siedziska 55 cm

### **WARUNKI GWARANCJI**

Wytwórca udziela na ten wyrób 24 miesięcznej gwarancji licząc od daty zakupu.

- W czasie okresu gwarancji wszystkie części, które ulegną uszkodzeniu z powodu błędów produkcyjnych lub użycia niewłaściwych materiałów będą bezpłatnie naprawione lub wymienione na nowe.
- Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia spowodowane naturalnym zużyciem, mechaniczne oraz spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.
- Nieautoryzowane zmiany i modyfikacje wyrobu spowodują utratę gwarancji.
- Numer seryjny znajduje się na naklejce samoprzylepnej, która umieszczona jest na wyrobie.
- Gwarancja nie obejmuje strat, które powstają w konsekwencji niemożności używania wyrobu, gdy usuwane są usterki.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zrozumienia niniejszej instrukcji.

W związku z ciągłym rozwojem technologicznym wytwórca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej instrukcji oraz w samym wyrobie bez uprzedzenia oraz bez konieczności modyfikowania wcześniejszych partii produktu i instrukcji.

**W przypadku wszelkich pytań dotyczących tego wyrobu prosimy zwracać się bezpośrednio do producenta lub do sprzedawcy.**