

“Jaguar” Nr. kat.: 312410

Lekka podpórka czterokołowa do użytku wewn. pomieszczeń



Instrukcja użytkowania



Wytwórca
MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Denmark
www.mobilex-care.com

Dystrybutor
MOBILEX Sp. z o.o.
siedziba:
ul. Radwańska 23/1, 90-540, Łódź
adres do korespondencji:
ul. Duńska 3/5, 91-204 Łódź
tel. +48 42 214 29 11
info@mobilex.pl

1. Informacje podstawowe

Szanowny kliencie,

Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera opis i ważne informacje o sposobie korzystania z wyrobu medycznego. Mają one pomóc w poprawnym i bezpiecznym korzystaniu z produktu. Jest bardzo ważne, aby przed rozpoczęciem użytkowania wyrobu dokładnie zapoznać się z instrukcją. Szczególną uwagę należy zwrócić na wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i zawsze ich przestrzegać.

Firma Mobilex cały czas stara się poprawiać i ulepszać swoje wyroby. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji i danych technicznych wyrobu bez konieczności dodatkowego powiadomienia o tym użytkowników.

Przewidziane zastosowanie i wskazania do korzystania z wyrobu

Podpórka "Jaguar" jest wyrobem medycznym, którego przewidzianym zastosowaniem jest asysta i pomoc we wstawaniu, staniu, chodzeniu i siadaniu osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach. Wskazaniem do korzystania są schorzenia powodujące inwalidztwo nie pozwalające siedzieć, stać i/lub chodzić samodzielnie. W związku z tym pojawia się potrzeba dodatkowej stabilnej podpory w trakcie wykonywania powyższych czynności. Wyrób umożliwia ludziom niepełnosprawnym samodzielne zrealizowanie wielu codziennych czynności bez pomocy osób trzecich.

Korzystanie z wyrobu do jakichkolwiek innych celów, niż te opisane powyżej jest zakazane.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z dystrybutorem, firmą Mobilex Sp. z o.o.

Mobilex Sp. z o.o.

Duńska 3/5
91-204 Łódź
Polska

Telefon: +48 42 214 29 11/12/13
Fax: +45 42 214 14 05
E-Mail: info@mobilex.pl

2. Wytyczne dot. bezpieczeństwa

- Korzystaj z wyrobu, będącego wyłącznie w dobrym stanie technicznym
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub usterki, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą wyrobu.
- Przestrzegaj informacji i uwag zawartych na etykietach wyrobu.
- Korzystaj z wyrobu wyłącznie do celu, do którego został on przewidziany.
- Nie dokonuj żadnych przeróbek i modyfikacji wyrobu, chyba że masz na nie pisemną zgodę wytwórcy.
- W trakcie składania, rozkładania oraz wykonywania różnych, dostępnych regulacji wyrobu zachowaj ostrożność, aby palce lub dłoń nie zostały przycięte przez elementy wyrobu.
- Wyrób powinien być używany wyłącznie wewnątrz budynków, na równej, stabilnej nawierzchni.
- W trakcie użytkowania wyrobu wszystkie koła muszą przez cały czas pozostawać w kontakcie z podłożem. Zapewnia to prawidłową równowagę wyrobu i zmniejsza ryzyko upadku.
- Jeśli rolator ma być używany pozostając bez ruchu, należy zawsze zaciągnąć hamulce.
- Wyrób nie może być obciążany masą większą niż maksymalne dopuszczalne obciążenie opisane w danych technicznych oraz na etykiecie wyrobu.
- Torba wyrobu nie może być obciążana masą większą niż jej maksymalne dopuszczalne obciążenie opisane w danych technicznych oraz na etykiecie wyrobu.

3. Opis

Opis wyrobu

Podpórka zapewnia dobrą zwrotność, stabilizację i poręczność. Dzięki konstrukcji zawiasowej łatwo ją złożyć do transportu lub przechowywania. Możliwa jest regulacja wysokości uchwytu do pchania, aby dopasować go do wzrostu użytkownika. Torba i taca umieszczone przed uchwytem pozwalają łatwo i wygodnie przewozić drobne przedmioty. Podpórka wyposażona jest w hamulce zapewniające bezpieczną kontrolę poruszania się. Wyrób dostarczany jest w kartonach, złożony, co ułatwia transport.

Zawartość kartonu stanowią:

- 1 złożona rama główna z kołami, torbą i tacą
- 1 zestaw uchwytów połączonych z dźwigną hamulcową.
- 1 Instrukcja użytkowania



Opis montażu

- Zapoznaj się z powyższą listą elementów i upewnij się, czy niczego nie brakuje. Jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości skontaktuj się natychmiast ze sprzedawcą wyrobu.
- Postaw podpórkę czterema kołami na płaskim podłożu.
- Jedną ręką chwyć za uchwyt do pchania. Drugą ręką chwyć za jedną z tylnych nóg ramy i ostrożnie pociągnij ją do tyłu, aż rama rozsunie się.
- Teraz naciśnij na uchwyt ku dołowi, aż nogi rozsuną się całkowicie i usłyszysz "kliknięcie" blokady zabezpieczającej ramę w pozycji rozłożonej.
- Pociągnij w górę za uchwyt i poruszaj podpórką próbując ją złożyć. Jeśli Ci się to nie uda oznacza to, że podpórka jest rozłożona i zabezpieczona prawidłowo.
- Zawsze upewnij się, że rama jest całkowicie rozłożona i stabilna, zanim użyjesz wyrobu.
- Ustaw uchwyty na wymaganej wysokości (patrz opis użytkowania).
- Zawsze przed użyciem wyrobu upewnij się, że czerwone dźwignienki mocujące uchwyt do pchania są zatrzasnięte, a wszystkie elementy są prawidłowo i pewnie zamontowane.
- Nieprzestrzeganie powyższych instrukcji może prowadzić do urazów ciała i uszkodzeń mienia.

Opis składania

- Zdejmij tacę z podpórki
- Aby złożyć podpórkę stań za nią, naciśnij jedną ręką i przytrzymaj czerwony przycisk blokady do składania ramy znajdujący się pod torbą (patrz zdjęcie). Jednocześnie drugą ręką pchnij tylne nogi ramy w stronę nóg przednich, aż podpórka złoży się całkowicie.

Opis użytkowania

- Aby zmienić ustawienie wysokości uchwytu do pchania odepnij czerwone dźwignienki blokady wysokości uchwytu i ustaw go w wymwanej pozycji. Zapnij dźwignienki mocujące. Obie strony uchwytu powinny zawsze być ustawione na tej samej wysokości.
- Właściwe dobieranie wysokości uchwytu: kiedy użytkownik stoi przy podpórce ze swobodnie

opuszczonymi rękami, uchwyt powinien znajdować się na wysokości jego nadgarstków. Wówczas ustawiony jest prawidłowo.

- Zawsze upewnij się przed użyciem, że rama jest prawidłowo rozłożona, wszystkie elementy dobrze dokręcone i zabezpieczone, a kółka działają prawidłowo.

Hamulce

- Aby ztrzymać podpórkę pociągnij dźwignię hamulców palcami w górę, ku uchwytowi do pchania i przytrzymaj ją w tej pozycji. Aby znowu ruszyć po prostu puść dźwignię hamulców, które samoczynnie opadną.
- Aby zablokować hamulce w pozycji "zaciągniętej" na czas dłuższego postoju jedną ręką pociągnij dźwignię hamulców w górę, a drugą ręką przypnij dźwignię do uchwytu do pchania przy użyciu zaczepu typu "C". Aby zwolnić hamulce pociągnij dźwignię hamulców ku górze, i kciukiem pchnij zaczep typu "C", aż opadnie w dół zwalniając hamulce.
- Jeśli korzystasz z podpórki w pozycji unieruchomionej, hamulce powinny zawsze być zaciągnięte i zablokowane. Nigdy nie pozostawiaj podpórki bez opieki, bez zaciągniętych hamulców. Nigdy nie pozostawiaj podpórki bez zaciągniętych hamulców na pochyłościach!

Transport wyrobu

Wyrób jest łatwy do składania i przewożenia w dowolnych środkach transportu. Wyrób nie może służyć jako podpora dla osób znajdujących się w jadących pojazdach. Na czas transportu wyrób powinien zostać złożony i zabezpieczony w sposób eliminujący ryzyko nieprzewidzianych ruchów

Akcesoria


Do tego wyrobu nie przewidziano żadnych dodatkowych akcesoriów.

4. Dane Techniczne

Wys. całk. podpórki / uchwytów do pchania (regulowana)	83,5-94,5 cm
Szer. całk.	54 cm
Dł. całk. (po złożeniu)	25 cm
Dł. całk.	66 cm
Średnica kół	7"
Max. obciążenie podpórki	100 kg
Max. obciążenie torby	5 kg
Masa wyrobu	6,6 kg
Hamulce	2 hamulce z blokadą postojową

Oznakowanie

Etykieta znamionowa jest zlokalizowana na jednej z dolnych rurek ramy.

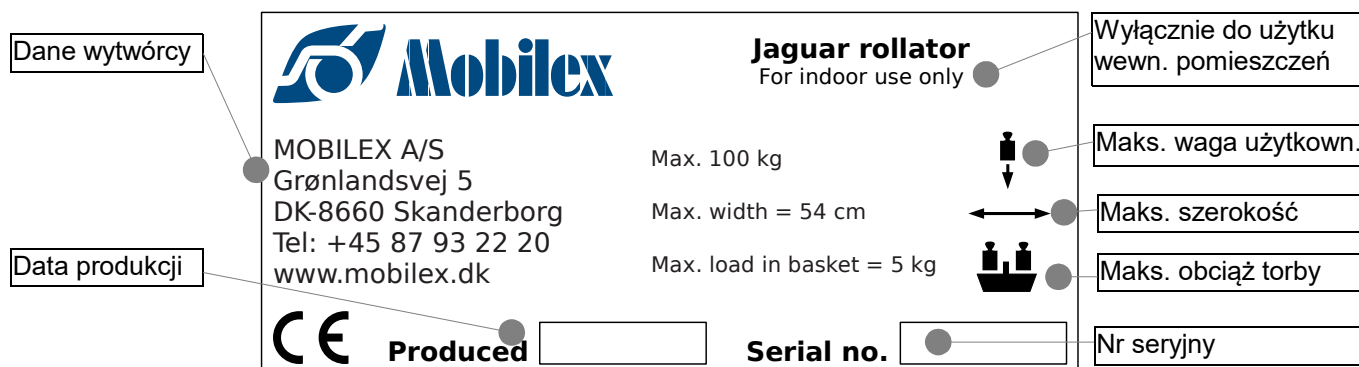

The diagram shows a rectangular label with the following content and callouts:

- Dane wytwórcy** (Manufacturer data): MOBILEX A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, Tel: +45 87 93 22 20, www.mobilex.dk
- Data produkcji** (Production date): A box for the production date.
- CE Produced**: CE mark and the word "Produced" followed by a box for the production date.
- Serial no.**: A box for the serial number.
- Jaguar rollator**: Product name and "For indoor use only".
- Max. 100 kg**: Maximum weight.
- Max. width = 54 cm**: Maximum width.
- Max. load in basket = 5 kg**: Maximum load in the basket.
- Wyłącznie do użytku wewn. pomieszczeń**: Exclusively for indoor use.
- Maks. waga użytkown.**: Maximum user weight.
- Maks. szerokość**: Maximum width.
- Maks. obciąż torby**: Maximum bag load.
- Nr seryjny**: Serial number.

5. Pielęgnacja i czyszczenie

Czyść wyrób regularnie i utrzymuj go w czystości. Zwykłe zabrudzenia elementów plastikowych i metalowych można usuwać z pomocą wilgotnej ściereczki i standardowego domowego, łagodnego detergentu. Zapoznaj się z instrukcją używania detergentu. Nie używaj preparatów żrących, wybielaczy, ani rozpuszczalników. Wyszuszyć wyrób suchą ściereczką.

Smaruj osie kół odpowiednim preparatem smarującym okresowo lub jeśli koła zaczną skrzypieć. Sprawdź sztywność i zamocowanie wszystkich elementów wyrobu. W razie potrzeby dokręć poluzowane śruby. Wymieniaj wszelkie uszkodzone lub zużyte elementy wyrobu natychmiast po zauważeniu usterki.

Pomimo solidnej konstrukcji i wykorzystania odpornych materiałów wyrób podlega stopniowemu zużyciu. Dlatego zalecamy, aby produkt był sprawdzany co jakiś czas przez autoryzowany serwis wyrobów ortopedycznych.

6. Najczęstsze problemy i ich rozwiązania

<i>Symptomy</i>	<i>Prawdopodobne przyczyny</i>	<i>Rozwiązanie problemu</i>
Koła nie obracają się gładko i równomiernie	Pomiędzy kołami i widelcami znajduje się bród.	Wyczyść przestrzeń pomiędzy kołami i widelcami. Nasmaruj koła.
Hamulce nie działają prawidłowo lub jeden z hamulców działa słabiej niż drugi.	Linka hamulca nie jest prawidłowo wyregulowana.	Konieczna regulacja hamulców. Skontaktuj się z serwisem.

7. Utylizacja wyrobu

Wyrób nie powinien być usuwany wraz ze zwykłymi odpadkami. Skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, aby ustalić właściwy sposób utylizacji wyrobu.

8. Gwarancja

Mobilex oferuje dwuletnią gwarancję na usterki i uszkodzenia wyrobu wynikające z błędów produkcyjnych lub wad materiałowych. Elementy wyrobu ulegające normalnemu zużyciu w trakcie użytkowania (np. koła, elementy hamulców) nie podlegają gwarancji. Usterki i uszkodzenia wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z wyrobem, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieautoryzowanych przeróbek wyrobu itp. nie podlegają gwarancji. W razie usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą wyrobu. Gwarancja nie pokrywa kosztów transportu wyrobu do i z serwisu. Gwarancja nie dotyczy ewentualnych szkód materialnych, ani urazów wynikających z usterek wyrobu.