

Instrukcja obsługi

Podpórka czterokołowa stalowa

Kod produktu TGR-R RS 880



Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

www.timago.com

1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

2. Wykonanie


Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Posiada tapicerowane siedzisko, miękkie oparcie i zdejmowany koszyk. Wyposażona w regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami oraz hamulce z zaciskiem postojowym. Posiada koła o wąskim przekroju i średnicy 8”.

Zestaw zawiera:

- Dwa uchwyty z hamulcami
- Ramę podpórki wraz z siedziskiem
- Oparcie
- Koszyk
- Śrubę blokującą- 2 szt.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. śruba blokująca
- d. linki hamulców
- e. oparcie
- f. sztyft blokujący
- g. belka poprzeczna
- h. zawias belki poprzecznej
- i. taśma składania ramy
- j. koszyk
- k. górna regulacja hamulca
- l. dolna regulacja hamulca

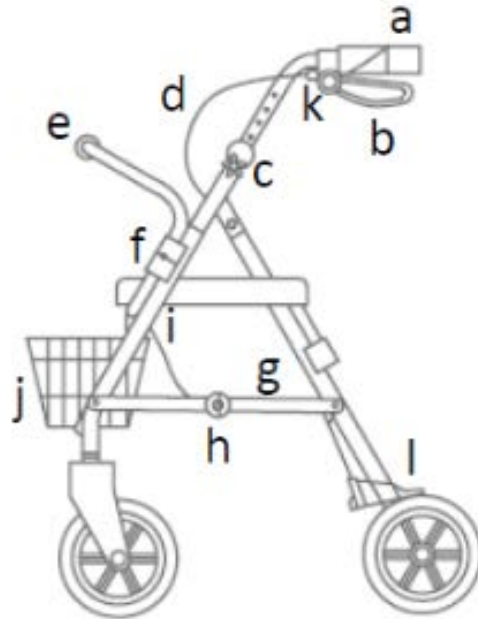

3. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

4. Montaż i główne zalecenia użycia

Uwaga! Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.

Uwaga! Nie należy używać podpórki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie ramy), ponieważ grozi to wypadkiem.

Rozłożenie i złożenie podpórki

- Aby rozłożyć podpórkę należy docisnąć belkę poprzeczną znajdującą się pod siedziskiem do momentu, aż zawiasy będą całkowicie rozłożone. Następnie

zamontować uchwyty w otworach montażowych na odpowiedniej wysokości dokręcając śruby blokujące, linki hamulców powinny znajdować się od zewnętrznej strony podpórki. Siedzisko należy oprzeć na rozłożonej ramie.

- Następnie zamontować oparcie w otworach montażowych z przodu podpórki do momentu zablokowania sztyftów.
- Koszyk można zawiesić na ramie z przodu podpórki.
- Należy zdjąć plastikowe ochroniacze z kół.
- Aby złożyć podpórkę do transportu należy zdjąć koszyk, opuścić siedzisko, a następnie pociągnąć do góry taśmę łączącą belkę poprzeczną z ramą, aż do momentu całkowitego złożenia ramy.

UWAGA! Należy zachować ostrożność podczas składania podpórki, ze względu na ryzyko przytraśnięcia palców w zawiasach.

Funkcja hamulców

Uwaga! Podczas pierwszego użycia podpórki może być konieczna pomoc osoby trzeciej, bez względu na stan zdrowia użytkownika.

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja wysokości uchwytów

Wysokość uchwytów należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na podpórce całym ciężarem ciała.

- Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śruby blokujące znajdujące się na zewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki i ponownie dokręcić śruby blokujące.

Uwaga! Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

Regulacja hamulców

Uwaga! Przed pierwszym użyciem zaleca się sprawdzenie stanu hamulców. W przypadku, gdy uchwyty hamulcowe nie hamują w takim samym stopniu należy je wyregulować.

Górna regulacja hamulca

- Należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować poprzez dokręcenie śruby zaciskowej.

Dolna regulacja hamulca

- Należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki i następnie dokręcić śrubę mocującą.

5. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	60 cm
Głębokość całkowita	73 cm
Wymiary siedziska	30 cm x 30 cm
Wysokość siedziska od podłoża	53 cm
Regulacja wysokości uchwytów	81-93 cm
Waga	9,2 kg
Max obciążenie	135 kg
Max obciążenie koszyka na zakupy	5 kg
Kolor ramy	ciemnoniebieski

6. Uwagi i zalecenia

- Z podpórki może korzystać tylko jedna osoba.
- Siedzisko służy tylko do chwilowego spoczynku.
- Przed skorzystaniem z siedziska należy uruchomić hamulec postojowy.
- Nie wolno korzystać z siedziska podpórki w celach transportowych.

- Podczas siedzenia na podpórce nie wolno wychylać się do tyłu, ponieważ może być to przyczyną wypadku.
- Nie wolno stawać na podpórce.
- Koszyk przeznaczony jest do transportu przedmiotów jedynie o niewielkiej masie i wielkości.
- Nie wolno zawieszać żadnych przedmiotów na podpórce, ponieważ może być to przyczyną wypadku.
- Podpórka przeznaczona jest dla użytkowników o maksymalnej wadze 135 kg.
- Podpórka przeznaczona jest do użycia na równych powierzchniach o nachyleniu mniejszym niż 5%.
- Ze względu na ryzyko upadku niedopuszczalne jest użycie podpórki na podłożu niedającym pewnego oparcia, tj. mokrym, oblodzonym, tłustym, silnie zapiaaszczonym.
- Dla bezpieczeństwa zaleca się usunięcie możliwych przeszkód w pomieszczeniu, zbyt wysokich dywanów, wystających progów, a także wyłożenie matami antypoślizgowymi śliskich podłóg.
- Należy unikać mokrych powierzchni w pomieszczeniach i poruszać się przy zapalonym świetle.
- Należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po nierównym chodniku, przy pokonywaniu krawężników. Nie należy chodzić tyłem.
- Nie należy dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych, wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi wytwórcy.
- Dla zachowania parametrów użytkowych podpórki ważne jest utrzymanie wszelkich jej elementów w czystości oraz odpowiedni sposób przechowywania. Składowanie w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łazienki, pralnie itp.) lub na wolnym powietrzu, w połączeniu z brakiem higieny spowoduje szybką utratę parametrów użytkowych i estetycznych.

UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

7. Konserwacja

Należy co najmniej raz na trzy miesiące, wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów łączących (zatraskowych, zawiasowych) wyrobu w tym należy sprawdzić:

- Hamulce
- Elementy mocujące (szyfty, śruby)
- Regulację wysokości uchwytów
- Stabilność i wygląd ramy

Czyszczenie

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).










8. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

10. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwośluzynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na: www.timago.com



Wytwórca:

Timago International Group

Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa

ul. Karpacka 24/12

43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 22.10.2018