

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka dwukołowa stalowa

Kod produktu: JMC-C 3511



## 1. Wykonanie


Podpórka dwukołowa, składana wykonana jest ze stalowej ramy malowanej proszkowo. Posiada szerokie, zgrzewane siedzisko z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Wyposażona w regulowane na wysokość anatomiczne uchwyty oraz w koła o średnicy 6”.

### Zestaw zawiera:

- dwa uchwyty
- ramę podpórki wraz z siedziskiem

### Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. zacisk blokujący
- c. Siedzisko
- d. taśma składania siedziska
- e. zawias belki poprzecznej

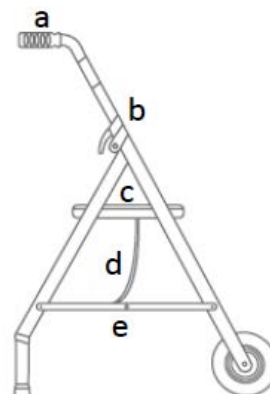

## 2. Zastosowanie

Podpórka dwukołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub

pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

### 3. Montaż

#### Rozłożenie i złożenie podpórki

- Podpórkę należy rozłożyć poprzez rozciągnięcie nóg i dociśnięcie belki poprzecznej do momentu, aż zawiasy będą całkowite rozłożone. Następnie należy zamontować uchwyty w otworach montażowych na odpowiedniej wysokości i zablokować zacisk. Siedzisko należy oprzeć na rozłożonej ramie.
- Aby złożyć podpórkę do transportu należy unieść siedzisko, a następnie pociągnąć do góry taśmę łączącą belkę poprzeczną z ramą, aż do momentu całkowitego złożenia ramy. Na końcu opuścić siedzisko.

**UWAGA!** Należy zachować ostrożność podczas składania podpórki, ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia palców w zawiasach.

#### Regulacja wysokości

Wysokość uchwytów należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik korzystając z podpórki, stał wyprostowany na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia, z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Niewskazane jest zawieszanie się na podpórce całym ciężarem ciała.

- Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odblokować zacisk znajdujący się na zewnętrznej stronie ramy, wybrać odpowiednią wysokość rurki i ponownie zablokować zacisk.

**Uwaga! Uchwyty muszą być ustawione na tym samym poziomie.**

### 4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	51 cm
Głębokość całkowita	60 cm

Wymiar siedziska	40 cm x 22 cm
Wysokość siedziska od podłoża	49 cm
Regulacja wysokości uchwytów	82-97 cm
Waga	5,76 kg
Max obciążenie	100 kg
Kolor ramy	niebieski

## 5. Uwagi i zalecenia

**Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## 6. Konserwacja

### Przeglądy

Należy systematycznie wykonywać przegląd wizualny wszystkich elementów łączących (zatrzaskowych, zawiasowych) wyrobu, w tym: regulacje wysokości uchwytów, działanie zacisku blokującego wysokość uchwytu, stabilność i wygląd ramy.

### Czyszczenie

Należy systematycznie dokonywać samodzielnej kontroli stanu technicznego podpórki:






- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

## 7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej,

jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.  
Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)

**Dziękujemy za wybór Timago!**



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021